

Držák úchopu je výborný pomocník pro držení lžice nebo tužky.

Držák úchopu má tvar obdélníku, z jehož vrchního rohu vychází zaoblený výstupek. Ve výstupku je vyšitá dírka, dále je k němu přišitá guma, na jejímž konci je přišitá měkká část suchého zipu. Ve spodním rohu je také přišitá guma s měkkou částí suchého zipu. Tělo držáku je vyrobeno z pevné bavlněné látky, vyztužené tvrzeným molitanem. Ze spodní strany je našitý protikus suchého zipu, a to jeho drsná část.

Rozlišujeme držák pro praváka a leváka a podle velikosti dlaně.

POPIS PRO PRAVÁKA: Tělo držáku položíme na stůl tak, aby se drsná část suchého zipu dotýkala stolu a výstupek s dírkou směřoval doleva. Tužku provlečeme dírkou shora směrem dolů. Na držák položíme dlaň tak, aby zaoblený výstupek s tužkou trčel mezi palcem a ukazovákem. Uchopíme vrchní gumu se suchým zipem a vedeme jí přes vrch dlaně směrem k drsnému protikusu zespodu dlaně. Poté uchopíme druhou gumu se suchým zipem a omotáme jí přes zápětí k druhému protikusu suchého zipu. Tužku povytáhneme, abychom ji mohli uchopit mezi prsty.

POPIS PRO LEVÁKA: Tělo držáku položíme na stůl tak, aby se drsná část suchého zipu dotýkala stolu a výstupek s dírkou směřoval doprava. Tužku provlečeme dírkou shora směrem dolů. Na držák položíme dlaň tak, aby zaoblený výstupek s tužkou trčel mezi palcem a ukazovákem. Uchopíme vrchní gumu se suchým zipem a vedeme ji přes vrch dlaně směrem k drsnému protikusu zespodu dlaně. Poté uchopíme druhou gumu se suchým zipem a omotáme jí přes zápětí k druhému protikusu suchého zipu. Tužku povytáhneme, abychom ji mohli uchopit mezi prsty.

Držák úchopu se může použít i pro lžici nebo nůž. V nabídce máme tři velikosti pro děti a dospělé, v krátké a prodloužené velikosti.

VELIKOSTI:

Držák úchopu č. 1 / 2 pravá

kód výrobku: 7,0904,0001/2

Držák úchopu č. 1 / 2 levá

kód výrobku: 7,0904,0004/5

Držák úchopu č. 3 pravá / levá

kód výrobku: 7,0904,0003/6

MATERIÁL: 100% bavlna, tvrzený molitan, guma a suché zipy.

ÚDRŽBA: pereme v pračce max. na 40°C.

Halter – (Schreib - und Esshilfe) ist ein hervorragendes Hilfsmittel fürs Halten eines Löffels oder eines Bleistiftes.

Halter – (Schreib - und Esshilfe) hat die Form des Rechtecks – aus seiner oberen Ecke geht ein abgerundeter Vorsprung hinaus. Im Vorsprung ist ein Loch bestickt, zu ihm ist weiter noch ein Gummi angenäht. Am Ende dieses Gummis ist sanfter Teil des Klettverschlusses angenäht. In unterer Ecke ist auch ein Gummi mit sanfterm Teil des Klettverschlusses angenäht. Der Hauptteil des Halters wird aus festem Baumwollstoff hergestellt, der mit dem gehärteten Schaumgummi verstärkt ist. Auf der interen Seite ist zweiter Teil des Klettverschlusses angenäht – sein grober Teil.

Man unterscheidet den Halter für den Rechtshänder und für den Linkshänder und nach der Größe der Handfläche.

BESCHREIBUNG FÜR DEN RECHTHÄNDER: Hauptteil des Halters legen wir auf den Tisch auf solche Weise hin, dass der grobe Teil des Klettverschlusses auf dem Tisch liegt. Der Vorsprung mit dem Loch sollte sich nach links richten. Der Bleistift wird durch das Loch von oben nach unten durchgezogen. Auf den Halter legt man die Handfläche so, dass der abgerundete Vorsprung mit dem Bleistift zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger wäre. Wir ergreifen das obere Gummi mit dem Klettverschluss und führen es über die Handfläche bis zu dem groben Teil des Klettverschlusses, der sich auf der unteren Seite der Handfläche befindet. Danach ergreifen wir das zweite Gummi mit dem Klettverschluss und umwinden es über die Handfläche zum zweiten groben Teil des Klettverschlusses. Der Bleistift kann herausgezogen werden, so dass wir ihn problemlos mit den Fingern ergreifen können.

BESCHREIBUNG FÜR DEN LINKSGÄNDER: Hauptteil des Halters legen wir auf den Tisch auf solche Weise hin, dass der grobe Teil des Klettverschlusses auf dem Tisch liegt. Der Vorsprung mit dem Loch sollte sich nach rechts richten. Der Bleistift wird durch das Loch von oben nach unten durchgezogen. Auf den Halter legt man die Handfläche so, dass der abgerundete Vorsprung mit dem Bleistift zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger wäre. Wir ergreifen das obere Gummi mit dem Klettverschluss und führen es über die Handfläche bis zu dem groben Teil des Klettverschlusses, der sich auf der unteren Seite der Handfläche befindet. Danach ergreifen wir das zweite Gummi mit dem Klettverschluss und umwinden es über die Handfläche zum zweiten groben Teil des Klettverschlusses. Der Bleistift kann herausgezogen werden, so dass wir ihn problemlos mit den Fingern ergreifen können.

Halter – (Schreib - und Esshilfe) kann auch für einen Löffel oder ein Messer verwendet werden. Wir bieten 3 Größen für Kinder und Erwachsene an, in kurzer oder verlängerter Größe.

GRÖßEN:

Halter – (Schreib - und Esshilfe) Nr. 1 / 2 rechte Variante

Produktcode: 7,0904,0001/2

Halter – (Schreib - und Esshilfe) Nr. 1 / 2 linke Variante

Produktcode: 7,0904,0004/5

Halter – (Schreib - und Esshilfe) Nr. 3 rechte/linke Variante

Produktcode: 7,0904,0003/6

MATERIAL: 100% Baumwolle, gehärteter Schaumgummi, Gummi und Klettverschlüsse

PFLEGE: in der Waschmaschine waschen bis max. 40°C



DRŽÁK ÚCHOPU

VÝBORNÝ POMOCNÍK PRO DRŽENÍ
LŽÍCE NEBO TUŽKY

HALTER

(SCHREIB - UND ESSHILFE)

HERVORRAGENDES HILFSMITTEL FÜRS HALTEN
EINES LÖFFELS ODER EINES BLEISTIFTES.



www.maxim-zdr.cz